

# CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA D80

## Com Elevação



# 1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Transferência D80 com Elevação.

Este Manual contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro do seu produto.

## CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

## DELLAMED S.A.

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço Matriz: Rua Henrique Rech, 312 - 95012-613 Caxias do Sul - RS

Endereço Centro de Distribuição: Rod Antonio Heil, 6250 - 88318-112 Itajaí – SC

Fabricante: Xiamen SenYang Co., Ltd.

Endereço: N° 77 Yandushan Road, Dagang Zhenjiang, Jiangsu, 212132 China.

Registro Anvisa: 80795950038



**QUEREMOS OUVIR VOCÊ!**

Atendimento ao Consumidor:

**0800.604.8008**

assistenciatecnica@dellamed.com.br



## 2. AVISOS DE SEGURANÇA ANTES DO USO

Por favor, guarde este manual em um local de fácil visualização e mantenha-o em um lugar seguro. Este manual indica claramente como usar este equipamento com segurança e de forma correta para evitar acidentes com você, a terceiros ou danos ao produto.

### 2.1 - Simbologia e seus significados:

	Peça de aplicação tipo B
	Atenção, cheque as informações disponíveis no manual
	Proibido, sinaliza toda e qualquer ação proibida

 <b>ATENÇÃO</b>	Apenas utilize o carregador original do produto.
	Mantenha as mãos longe do sistema dos pistões de elevação durante o uso para evitar o esmagamento dos membros.
	Evite expor o equipamento ao contato excessivo de água (por exemplo, colocá-lo de baixo do chuveiro), para evitar que curto-circuitos e oxidação da estrutura afetem a vida útil do produto.
	Ao iniciar o carregamento da bateria, uma luz vermelha acenderá no joystick iniciando o carregamento e, ao finalizar, será sinalizado com uma luz verde.
	A manutenção do equipamento deve ser efetuada apenas por pessoal autorizado.



**PROIBIDO**

A fonte de alimentação interna deste produto é uma bateria não substituível. É proibido abrir a sua capa de proteção durante o uso.

Para sua segurança, evite utilizar o equipamento durante o processo de carregamento da bateria.

Este produto não deve ser usado para locomover pessoas com peso acima de 135 kg.

Deixe o produto fora do alcance do alcance de crianças.

É estritamente proibido utilizar o equipamento com objetos obstruindo seu funcionamento. Esta ação pode causar danos ao aparelho.

### 3. CONHECENDO O SEU PRODUTO

A Cadeira de Transferência Dellamed tem como finalidade auxiliar pessoas com dificuldades de locomoção, utilizada para o transporte em curtas distâncias. Através do seu joystick de fácil acesso e uso, pode-se movimentar os pacientes verticalmente, facilitando na vida cotidiana.

Durante o seu uso, o equipamento pode ser deslocado para todas as direções, reduzindo drasticamente o esforço físico do cuidador, proporcionando comodidade e contribuindo para sua qualidade de vida. O equipamento conta também com trava nas rodas próximas ao pistão, garantindo ainda mais segurança.

### 4. COMPONENTES E MONTAGEM

Verifique se os componentes do equipamento estão completos, sem avarias e em bom estado para realizar a montagem. Caso ocorra quaisquer problemas na instalação, por favor entre em contato com a assistência técnica ou postos autorizados que possam auxiliar com instruções profissionais, a fim de evitar avarias ao produto.

## 4.1 - Lista de componentes:



1 - Estrutura de suporte	8 - Bateria
2 - Barras de sustentação	9 - Joystick
3 - Base inferior	10 - Pedais de apoio
4 - Assento ajustável direito	11 - Travas tipo C
5 - Assento ajustável esquerdo	12 - Encosto
6 - Pistão de elevação	13 - Kit de Montagem
7 - Carregador	

## 4.2 - Instruções de montagem:

1 - Retire todas as peças e componentes da caixa.

2 - Com a base inferior posicionada (3), encaixe as barras de sustentação (2) e coloque as travas tipo C (11) nos encaixes laterais.



3 - Acople a estrutura de suporte da cadeira (1), junto às barras de sustentação (2);



4 - Separe o kit montagem, acople o pistão de elevação (4) na base inferior (3) com o encaixe da bateria voltado para baixo. Após, aperte o parafuso entre as duas peças.



5 - Acople o pistão de elevação (6) na estrutura de suporte (1), ajuste o pistão de elevação(6) nas duas bases, após aperte os parafusos;



6 - Encaixe o encosto (12) na estrutura do assento ajustável e coloque os parafusos



7 - Encaixe o assento ajustável direito (4), e esquerdo (5) na estrutura do suporte (1), mantendo-o centralizado na estrutura;



8 - Antes de iniciar os testes do produto, verifique se a bateria está carregada, após opere o joystick do pistão de elevação (4) validando o funcionamento do produto.

## 5. INSTRUÇÕES DE USO



### ATENÇÃO

Antes de utilizar o equipamento, certifique-se de que os componentes de elevação estejam bem encaixados na base para garantir a segurança do paciente.

Carregue a bateria de 2 a 3 horas na primeira vez que for utilizar o aparelho.



▲ Elevação;

ⓓ Parada;

▼ Descida;

Ao utilizar o joystick, pressione “▲” para elevar o assento, ou “▼” para diminuir sua altura. Para parar alguma operação realizada, solte a manopla e coloque-a na posição neutra, indicada como “ⓓ” (conforme ilustrado na imagem anterior). Caso a manopla não seja posta na posição neutra, a elevação do assento irá parar automaticamente quando o mesmo atingir sua altura máxima ou altura mínima.

## 6. ESPECIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS

Dimensões (C x L x A)	750 x 530 x 1250 mm
Faixa de elevação	330 mm   450 mínima - 730 máxima
Peso líquido	24,3 kg
Peso máximo suportado	135 kg
Tensão de entrada	AC100-240v (Adaptador de entrada)
Tensão nominal	DC 24V (Adaptador de saída)
Potência nominal	100W/2A
Classificação de proteção contra choques elétricos	Peça de aplicação tipo B
De acordo com o nível de segurança, quando usado no caso de gás anestésico inflamável misturado com ar, ou gás anestésico inflamável misturado com oxigênio e/ou óxido nitroso	Equipamento do tipo não AP/APG
Protegido contra objetos sólidos estranhos de de 1 mm e maior; Protegidos contra gotas d'água.	Proteção IP44

### 6.1 - Condições de ambiente para uso:

Temperatura do ambiente: +10°C ~ +40°C

Umidade relativa: 30% ~ 75%

Pressão atmosférica: 700hPa ~ 1060hPa

**ATENÇÃO: Não utilize o equipamento em lugares com substâncias corrosivas, inflamáveis ou em ambientes sujos.**

### 6.2 - Condições de ambiente para armazenagem:

Temperatura do Ambiente: 0°C ~ +50°C

Umidade relativa: ≤93%

Pressão atmosférica: 500hPa ~ 1060hPa

• Guarde a cadeira em um local arejado sem a presença de gases inflamáveis ou corrosivos;

- Sempre armazene e transporte este produto com cuidado;
- Não coloque objetos sob a cadeira;
- Não armazene este produto em lugares que possam respingar ou entrar em contato com qualquer tipo de líquido corrosivo no ambiente.

## 7. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de eventuais falhas, (sendo elas para carregar ou locomover), por favor entre em contato com a assistência técnica para mais informações.

## 8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomenda-se utilizar um pano macio umedecido para a limpeza do assento antes do primeiro uso. Para a realização de desinfecção, utilize álcool médico ou desinfetantes não corrosivos.

**ATENÇÃO: Sempre mantenha a bateria carregada. A bateria, quando descarregada completamente, têm sua vida útil reduzida, podendo sofrer danos permanentes;**

- Procure utilizar o equipamento ao menos uma vez na semana. Esta ação prolonga a vida útil da bateria;
- Quando realizar o descarte deste equipamento, desfaça-se da bateria de acordo com a regulação de órgãos locais;
- Depois de certo tempo de uso, verifique se os parafusos continuam apertados. Caso não estiverem, realize a manutenção necessária assim que possível.



Se o produto apresentar rigidez ou dificuldade para subir ou descer, é necessário **lubrificar** os pistões do equipamento para seu correto desempenho.

**\*Lubrificar de 4 em 4 meses com uma pequena quantidade de graxa no local indicado.**



**PROIBIDO**

Não carregue a bateria do equipamento ou utilize a função de elevação durante a limpeza ou desinfecção, a fim de evitar danos à cadeira e lesões corporais.

É proibido mergulhar completamente o aparelho e seus acessórios dentro de líquidos para limpeza ou desinfecção, pois esta ação pode comprometer seu funcionamento.

## 9. CONDIÇÕES DE GARANTIA

### 1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

- a) O produto acima identificado possui garantia legal de 90 (noventa) dias para todos os seus componentes. Findando este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual de:  
· 9 (nove) meses para a estrutura - totalizando 1 (um) ano de garantia;
- b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.
- c) Está garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.
- d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.
- e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

### 2 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

- a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade apresentada pela Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela fabricante.
- b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada dentro do mesmo perímetro urbano do consumidor, são de responsabilidade do usuário.
- c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas à Dellamed se encontra disponível no website oficial da fabricante: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>.

### 3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

- a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada à Dellamed;
- b) Alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;
- c) O desgaste natural do produto;
- d) Danos decorrentes de falhas ou sobrecargas no fornecimento de energia elétrica;
- e) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;
- f) Ligação do produto em rede elétrica/tensão inadequada, ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;
- g) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;
- h) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;
- i) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;
- j) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;
- k) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inapropriado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;
- l) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;
- m) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;
- n) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inapropriado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;
- o) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;
- p) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;
- q) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.

## CONHEÇA OUTROS PRODUTOS DELLAMED



Cadeira de Banho D30 - Comadre Expansível - Cadeira de Banho D60



Versão 02 – Data 20/10/2023



7 908607 300161