

Cadeira de Banho

# MODELO D30



dellamed  
Home

# 1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Banho D30.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro do seu produto.

## CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

Detentor de registro e fabricante legal: **DELLAMED S.A.**

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço: Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Cinquentenário  
CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS - Brasil

País de origem: China.

Registro Anvisa: 80795950045



**QUEREMOS OUVIR VOCÊ!**

Atendimento ao Consumidor:

**0800.604.800 8**

[assistenciatecnica@dellamed.com.br](mailto:assistenciatecnica@dellamed.com.br)



## 2. SOBRE O PRODUTO

A cadeira de banho D30 Dellamed é a melhor escolha para quem procura boa qualidade no melhor preço possível. Considerada a cadeira de banho de melhor custo-benefício da categoria, a D30 é dobrável e oferece comodidade e segurança para as pessoas com limitações de movimento e equilíbrio durante o banho. Os rodízios dianteiros com freios e o descanso para pés proporcionam maior segurança e conforto para o usuário.

## 3. LISTA DE COMPONENTES

A tabela abaixo ilustra todos os componentes que compõem a sua cadeira de rodas D30:

 1 Un.	1. Encosto	 1 Un.	2. Estrutura Superior
 2 Un.	3. Estrutura Inferior	 1 Un.	4. Descanço de Pés
 1 Un.	5. Assento	 4 Un.	6. Rodízios
 1 Un.	7. Chave Allen	 1 Un.	8. Chave de Aperto
 4 Un.	9. Parafusos dos rodízios	 2 Un.	10. Parafuso com manípulo

*AVISO: Alguns componentes podem possuir variações de cor e/ou outros atributos diferentes das apresentadas anteriormente. Contudo, tais variações não impactam na usabilidade e nas características do produto.*

## 4. MONTAGEM

**PASSO 1** - Inicie a montagem abrindo a estrutura superior. Vire-a para baixo e, com a estrutura inferior, encaixe-a na estrutura superior, pressionando o pino click. **ATENÇÃO: Atente-se para que o encaixe do descanso de pés fique em sentido oposto ao encaixe do assento, como indicado na figura 3.**



**PASSO 2** - Os rodízios devem ser fixados na estrutura com os parafusos do kit montagem, conforme fotos abaixo. Lembrando que a cabeça do parafuso deve estar na direção para dentro da estrutura. **ATENÇÃO: Os rodízios que possuem trava devem ser instalados no lado frontal, onde encontra-se o encaixe para o descanso de pés.**



**PASSO 3** - Vire a cadeira e encaixe o descanso para pés, pressionando o pino click.



**PASSO 4** - Encaixe o assento, como indicado abaixo.



**PASSO 5** - Por fim, finalize a montagem realizando o encaixe do encosto. Utilize o parafuso com manípulo para fixar o encosto na estrutura e, com a chave allen, finalize o aperto. Atente-se para que o manípulo fique virado para trás da estrutura.



## 5. DICAS DE USO

- Durante o uso, ao sentar ou levantar da cadeira, mantenha os freios dos rodízios acionados, pressionando as travas para baixo. Dessa forma, a cadeira se manterá imóvel, garantindo a segurança do usuário.
- Evite deixar a cadeira exposta aos raios solares por um longo período. Isso prolonga a vida útil do produto, evitando ressecamento e possíveis rachaduras das peças plásticas.
- Durante o banho, com o uso de shampoo e sabonetes, o assento pode se tornar escorregadio, ocasionando acidentes.

### **ATENÇÃO**

**Não utilize o descanso de pés para subir ou descer da cadeira. Tal ação pode ocasionar acidentes. A finalidade deste componente é apenas para proporcionar conforto, enquanto o usuário estiver sentado.**



\*Imagem ilustrativa.

A cadeira de banho D30 é robusta e resistente a umidade. Contudo, alguns cuidados pós-uso são necessários para que a água não permaneça acumulada na parte interna da cadeira. É importante que seja feita a retirada do encosto, virando a mesma de cabeça para baixo, para que haja o escoamento da água.

Para isso, é importante retirar a cadeira da área de banho e de locais úmidos para evitar com que ela permaneça em contato com a umidade por períodos muito longos. Adicionalmente, recomenda-se deixar a cadeira em local arejado, porém sem deixá-la exposta ao sol, até a cadeira secar completamente.

Com estes cuidados, sua cadeira de banho terá uma vida útil prolongada.

## 6. DADOS TÉCNICOS

Altura do solo até a parte inferior da estrutura do assento	49 cm	Altura do solo até a parte superior do apoio de braços	71 cm
Altura do solo até a parte superior do tupo do encosto	91,5 cm	Largura interna entre as estruturas internas dos tubos	36,5 cm
Altura do solo até a parte inferior da estrutura do apoio de pés	13,5 cm	Distância da parte superior do tubo da estrutura lateral até a parte superior do apoio dos braços	24 cm
Largura interna entre a parte interna dos apoios de braços	43,5 cm	Distância da parte externa do tubo da estrutura até a parte externa do apoio de pés	19 cm
Peso do Produto	6,6 kg	Peso suportado	100 kg

## 7. TERMOS DE GARANTIA

### 1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

- a) O produto acima identificado possui garantia legal de 03 (três) meses para todos os seus componentes. Encerrado este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual adicional de:
  - 3 (três) meses para estrutura - totalizando 6 (seis) meses de garantia;
- b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.
- c) Esta garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.
- d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.

e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

## **2 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA**

a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade pela Assistência Técnica da Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela mesma.

b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada são de responsabilidade do consumidor.

c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas pela Dellamed se encontra disponível no website oficial: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>, no caso de inexistência de Assistência Técnica credenciada no domicílio do consumidor, aplica-se o contido no item “b” acima informado.

## **3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA**

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada pela Dellamed;

b) Alteração e/ou remoção do número de série/lote ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;

c) O desgaste natural do produto;

d) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;

e) Ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;

f) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;

g) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;

h) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;

i) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;

j) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inapropriado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;

k) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;

l) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;

m) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inapropriado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;

n) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;

o) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;

p) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.

# Silla de Baño

## MODELO D30

### 1. INTRODUCCIÓN

Estimado Cliente,

Gracias por comprar su silla de baño Dellamed D30.

Este manual de instrucciones contiene las recomendaciones necesarias para el uso correcto y seguro de su silla de baño.

#### CONOZCA DELLAMED

Creada en 2010, en la ciudad de Caxias do Sul - RS, Dellamed es sinónimo de calidad e innovación. Buscando siempre el buen servicio, Dellamed tiene como lema principal tener la salud de los clientes en 1er lugar, buscando así ofrecer los mejores productos del mercado para poder atender eficientemente a todos los consumidores finales.

Fabricante: **DELLAMED S.A.**

Dirección Principal: Rua Henrique Rech, 312 - 95012-613 Caxias do Sul - RS

Dirección Centro de Distribución: Rod Antonio Heil, 6250 - 88318-112 - Itajaí - SC

### 2. SOBRE EL PRODUCTO

La silla de baño D30 Dellamed es la mejor elección para quien busca buena calidad al mejor precio posible. Considerada la mejor silla de baño rentable de su categoría, la D30 es plegable y ofrece comodidad y seguridad para personas con movimiento y equilibrio limitados durante la ducha. Las ruedas delanteras con freno y el reposapiés brindan mayor seguridad y comodidad al usuario.

### 3. LISTA DE COMPONENTES

La tabla de abajo ilustra todos los componentes que componen su silla de reudas D30:

 1 Un.	1. Respaldo	 1 Un.	2. Estructura Superior
 2 Un.	3. Estructura Inferior	 1 Un.	4. Reposapiés



 <p>1 Un.</p>	<p>5. Asiento</p>	 <p>4 Un.</p>	<p>6. Ruedas</p>
 <p>1 Un.</p>	<p>7. Llave Allen</p>	 <p>1 Un.</p>	<p>8. Llave de apriete</p>
 <p>4 Un.</p>	<p>9. Tornillos de las ruedas</p>	 <p>2 Un.</p>	<p>10. Tornillo con mango</p>
<p><i>AVISO: Algunos componentes pueden tener variaciones de color y/u otros atributos diferentes a los que se muestran arriba. Sin embargo, tales variaciones no afectan la usabilidad y las características del producto.</i></p>			

## 4. MONTAJE

**PASO 1** - Iniciar el montaje abriendo la estructura superior. Déle la vuelta y, con la estructura inferior, encájelo en la estructura superior, presionando el pasador de clic. **ATENCIÓN: Asegúrese de que el inserto del reposapiés esté en la dirección opuesta al inserto del asiento, como se muestra en la figura 3.**



**PASO 2** - Las ruedas deben fijarse a la estructura con los tornillos del kit de montaje, como se muestra en las fotos a continuación. Recordando que la cabeza del tornillo debe estar en dirección hacia el interior de la estructura. **ATENCIÓN: Las ruedas que tienen bloqueo deben instalarse en la parte delantera, donde se encuentra la ranura del reposapiés.**



**PASO 3** - Dé la vuelta a la silla y coloque el reposapiés, presionando el pasador de clic.



**PASO 4:** coloque el asiento como se muestra a continuación.



**PASO 5** - Finalmente, complete el montaje colocando el respaldo. Utilice el tornillo con asa para fijar el respaldo a la estructura y, con la llave allen, termine de apretar. Asegúrese de que la manija esté girada hacia la parte posterior de la estructura.



## 5. CONSEJOS DE USO

- Durante el uso, al sentarse o levantarse de la silla, mantenga activados los frenos de las ruedas, presionando los bloqueos hacia abajo. De esta forma, la silla permanecerá inmóvil, garantizando la seguridad del usuario.
- Evite dejar la silla expuesta a la luz solar durante mucho tiempo. Esto prolonga la vida útil del producto, evitando la sequedad y posible agrietamiento de las partes plásticas.
- Durante el baño, con el uso de champú y jabón, el asiento puede volverse resbaladizo, provocando accidentes.

### ¡ATENCIÓN!

**No utilice el reposapiés para subir o bajar de la silla. Tal acción puede causar accidentes. El propósito de este componente es solo brindar comodidad mientras el usuario está sentado.**



*\*Imagen ilustrativa.*

La silla de baño D30 es robusta y resistente a la humedad. Sin embargo, se requieren algunos cuidados posteriores al uso para que no se acumule agua dentro de la silla. Es importante quitar el respaldo, volteándolo boca abajo, para que haya drenaje de agua.

Para ello, es importante retirar la silla de la zona de baño y de lugares húmedos para evitar que permanezca en contacto con la humedad durante periodos muy prolongados. Adicionalmente, se recomienda dejar la silla en un lugar aireado, pero sin dejarla expuesta al sol, hasta que la silla se seque por completo.

Con estas precauciones, su silla de baño tendrá una larga vida útil.

## 6. DATOS TÉCNICOS

Altura desde el suelo hasta la parte inferior del marco del asiento	49 cm	Altura desde el suelo hasta la parte superior del reposabrazos	71 cm
Altura desde el suelo hasta la parte superior del tubo del respaldo	91,5 cm	Ancho interno entre las estructuras internas de los tubos	36,5 cm
Altura desde el suelo hasta la parte inferior del marco del reposapiés	13,5 cm	Distancia desde la parte superior del tubo del marco lateral hasta la parte superior del reposabrazos	24 cm
Ancho interior entre el interior de los reposabrazos	43,5 cm	Distancia desde el exterior del tubo del marco hasta el exterior del reposapiés	19 cm
Peso del Producto	6,6 kg	peso soportado	100 kg

dellamed



Versão 01 – Data 17/08/2023

