

Cadeira de Banho

MODELO D50

Português e Espanhol

dellamed

www.dellamed.com.br



Versão 02 – Data 19/07/2023



dellamed
Home

1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Banho D50.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro da sua cadeira de rodas.

CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

Detentor do Registro e Fabricante Legal: **DELLAMED S.A.**

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço: Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Cinquentenário
CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS - Brasil

Registro da Anvisa: 80795950045

 **QUEREMOS OUVIR VOCÊ!**
Atendimento ao Consumidor Brasileiro:
0800.604.8008
assistenciatecnica@dellamed.com.br



PASO 4:

Coloque la estructura de la silla con las patas hacia abajo. Instale el reposapiés, colocándolo en los herrajes de plástico; Luego, presione el botón de clic del pasador para realizar el ajuste.

NOTA: Asegúrese de escuchar un clic al colocarlo para asegurarse de que el reposapiés se haya instalado correctamente.



⚠ ATENCIÓN

Nunca utilice el producto sin el reposapiés correctamente montado.

PASO 5:

Instale el asiento, encajándolo en la barra trasera de la estructura. Después de eso, mueva el asiento hacia abajo con cuidado. Finalmente, coloque el cojín debajo del asiento.



PASO 6:

Para instalar el respaldo, colóquelo y fíjelo con el clip de fijación.



PASO 7:

Finalmente, instale el orinal desde el respaldo de la silla, colocándolo sobre el soporte.

NOTA: Antes de comenzar a utilizar el producto, compruebe que es sólido y que todas las piezas se han colocado correctamente.



4. DATOS TÉCNICOS

Peso del Producto:	9,6 kg
Comprimento total:	840 mm
Largo total:	560 mm
Altura total:	1100 mm
Peso soportado:	150 kg

5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PASO 1:

Retire con cuidado el producto del embalaje. Retire la película de plástico, abra el marco principal de la silla para que el inserto del reposapiés quede hacia adentro.



PASO 2:

Retire con cuidado el producto del embalaje. Retire la película plástica, abra el marco principal de la silla para que el resto del inserto quede adentro.

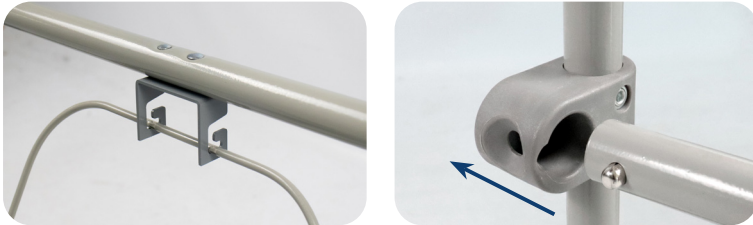

PASO 3:

Coloque la estructura de la silla con las patas hacia arriba. Freno de rueda delantera con bloqueo para un fácil montaje. Montar las ruedas con el agujero alineado con la estructura, colocar el tornillo con la cabeza hacia la estructura y, tras apretar la tuerca con la llave de un lado, terminar de atornillar el otro lado con la llave allen.



2. SOBRE O PRODUTO

A cadeira de rodas higiênica para banho D50 Dellamed é ideal para pessoas com dificuldades de locomoção, auxiliando-as no momento da higiene pessoal. A D50 é dobrável, desmontável e, com 4 rodízios giratórios, ela é a opção perfeita para ambientes com espaço reduzido. Seu assento acolchoado removível oferece conforto adicional ao usuário em usos mais longos. Por fim, acompanha comadre e pode ser usado sobre o vaso sanitário.

3. CONHECENDO O PRODUTO



 1 Un.	 1 Un.	 4 Un.	 1 Un.	 1 Un.
Encosto	Apoio para Pés	Rodízios	Suporte para Comadre	Chave Allen e Chave de Boca
 1 Un.	 1 Un.	 1 Un.	 1 Un.	 4 Un.
Estrutura da Cadeira	Assento	Almofada do Assento	Comadre	Parafusos dos Rodízios

**Imagens ilustrativas. Alguns componentes podem possuir variações de cor e/ou outros atributos diferentes das apresentadas anteriormente. Contudo, tais variações não impactam na usabilidade e nas características do produto.*

4. DADOS TÉCNICOS

Peso do produto:	9,6 kg
Comprimento total:	840 mm
Largura total:	560 mm
Altura total:	1100 mm
Peso suportado:	150 kg

5. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


PASSO 1:

Retire o produto da embalagem com cuidado. Remova o filme plástico, abra a estrutura principal da cadeira de forma que o encaixe do descanso de pés fique voltado para dentro.



PASSO 2:

Encaixe o suporte para comadre na barra traseira da cadeira. Após isso, encaixe a barra da estrutura frontal do assento, pressionando o botão pino click para dentro.

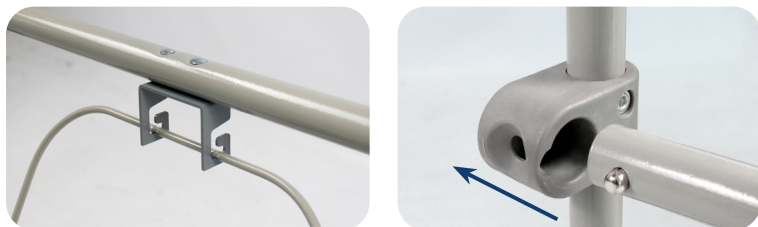

PASSO 3:

Posicione a estrutura da cadeira de pernas voltadas para cima. Trave o freio das rodas frontais para facilitar a montagem. Encaixe as rodas com a perfuração alinhada com a estrutura, coloque o parafuso com sua cabeça virada para a estrutura e, após apertar a porca com a chave de boca de um lado, termine de parafusar o outro lado com a chave allen.



⚠️ ATENÇÃO

Durante el baño, debido al uso de champú y jabón, el asiento puede volverse resbaladizo. No utilice el reposapiés para subir o bajar de la silla. Solo debe usarse para descansar los pies mientras el paciente está sentado.

3. CONOCIENDO EL PRODUCTO



 1 Un.	 1 Un.	 4 Un.	 1 Un.	 1 Un.
Respaldo	Reposapiés	Rueda	Apoyo de la bacinilla	Chave Allen e Chave de Boca
 1 Un.	 1 Un.	 1 Un.	 1 Un.	 4 Un.
Estructura de la silla	Asiento	Cojín del asiento	Bacinilla	Tornillos de Ruedas

* Imágenes ilustrativas. Algunos componentes pueden tener variaciones de color y/u otros atributos diferentes a los que se muestran arriba. Sin embargo, tales variaciones no afectan la usabilidad y las características del producto.

Silla de Baño

MODELO D50

1. INTRODUCCIÓN

Estimado Cliente,

Gracias por comprar su silla de ruedas motorizada Dellamed D50.

Este manual de instrucciones contiene las recomendaciones necesarias para el uso correcto y seguro de su silla de Ruedas.

CONOZCA DELLAMED

Creada en 2010, en la ciudad de Caxias do Sul - RS, Dellamed es sinónimo de calidad e innovación. Buscando siempre el buen servicio, Dellamed tiene como lema principal tener la salud de los clientes en 1er lugar, buscando así ofrecer los mejores productos del mercado para poder atender eficientemente a todos los consumidores finales.

Fabricante **DELLAMED S.A.**

Dirección Principal: Rua Henrique Rech, 312 - 95012-613 Caxias do Sul - RS

Dirección Centro de Distribución: Rod Antonio Heil, 6250 - 88318-112 - Itajaí - SC

2. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Frenos: Para bloquear la silla, basta con empujar los frenos.
- Seguridad: Al sentarse o levantarse de la silla, mantenga los frenos activados.

Mantenimiento:

1. Mantenga lubricados los ejes, los cojinetes de las ruedas y las articulaciones.
 2. El secado de su silla D50 es muy importante; Después de la ducha, elimine cualquier residuo restante de la superficie de la silla.
 3. Evite dejar la silla expuesta a la luz solar por períodos prolongados, esto evitará la sequedad y posibles grietas en las partes plásticas.
- La silla de acero al carbono D50 es robusta y resistente a la humedad. Sin embargo, como todas las sillas de acero al carbono, está sujeta a la corrosión. Se requieren algunos cuidados adicionales posteriores al uso, para que no se acumule agua dentro de la silla. Es importante quitar el respaldo por ambos lados, dándole la vuelta para que salga el agua.
- Adicionalmente, se recomienda dejar la silla en un lugar aireado hasta que se seque. Es importante retirar la silla de la zona del baño para que no quede siempre en un lugar húmedo.
- Con estas precauciones, su silla tendrá una vida útil más larga, garantizando la seguridad del usuario.

PASSO 4:

Posicione a estrutura da cadeira de pernas voltadas para baixo. Instale o descanso dos pés, posicionando-o nos encaixes plásticos; Então, pressione o botão pino click para realizar o encaixe.

NOTA: Certifique-se de ouvir um clique no momento do encaixe para garantir que o descanso de pés tenha sido instalado corretamente.



ATENÇÃO

Nunca utilize o produto sem que o descanso para pés esteja devidamente montado.

PASSO 5:

Instale o assento, encaixando-o na barra traseira da estrutura. Após isso, basta movimentar o assento para baixo, cuidadosamente. Por fim, coloque a almofada sob o assento.



PASSO 6:

Para instalar o encosto, encaixe e fixe-o utilizando o grampo de fixação.



PASSO 7:

Por fim, instale a comadre pela parte de trás da cadeira, colocando-a no suporte.

NOTA: Antes de iniciar o uso do produto, verifique se o mesmo está sólido e se todas as peças foram encaixadas corretamente.



6. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Freios: Para travar a cadeira, basta empurrar as travas dos freios.
- Segurança: Ao sentar ou levantar da cadeira, mantenha os freios acionados.

Manutenção:

1. Mantenha eixos, rolamentos das rodas e articulações lubrificadas.
2. A secagem da sua cadeira D50 é muito importante; Após o banho, remova qualquer resíduo restante da superfície da cadeira.
3. Evite deixar a cadeira exposta aos raios solares por longos períodos, isso evitará ressecamento e possíveis rachaduras de peças plásticas.



*Imagem Ilustrativa

A cadeira de aço carbono D50 é robusta e resistente à umidade. Porém, como todas as cadeiras em aço carbono, ela está sujeita à corrosão. Alguns cuidados adicionais pós-uso são necessários, para que a água não permaneça acumulada na parte interna da cadeira. É importante que seja feita a retirada do encosto das duas laterais, virando a mesma de cabeça para baixo para que a água escorra para fora.

Adicionalmente, recomenda-se deixar a cadeira em local arejado até secar. É importante a retirada da cadeira da área de banho para que a mesma não se mantenha sempre em local úmido.

Com estes cuidados, sua cadeira terá uma vida útil mais longa, garantindo a segurança do usuário.

⚠️ ATENÇÃO

Durante o banho, por conta do uso de shampoo e sabonetes, o assento pode se tornar escorregadio. Não use o descanso para pés para subir ou descer da cadeira. O mesmo deve ser utilizado apenas para o descanso dos pés enquanto o paciente estiver sentado.

7. CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 - CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

- a) O produto acima identificado possui garantia legal de 03 (três) meses para todos os seus componentes. Encerrado este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual adicional de:
- 9 (nove) meses para a estrutura - totalizando 12 (doze) meses de garantia;
 - b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.
 - c) Esta garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.
 - d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.
 - e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

2 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

- a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade pela Assistência Técnica da Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela mesma.
- b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada são de responsabilidade do consumidor.
- c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas pela Dellamed se encontra disponível no website oficial: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>, no caso de inexistência de Assistência Técnica credenciada no domicílio do consumidor, aplica-se o contido no item "b" acima informado.

3 - EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

- a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada pela Dellamed;
- b) Alteração e/ou remoção do número de série/ lote ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;
- c) O desgaste natural do produto;
- d) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;
- e) Ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;
- f) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;
- g) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;
- h) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;
- i) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;
- j) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inapropriado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;
- k) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;
- l) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;
- m) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inapropriado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;
- n) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;
- o) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;
- p) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.